

Capillari



Capillari e accessori



Per microematocrito monouso

Suggerimenti per l'uso:

Chiusura del capillare riempito - Tenere il capillare tra il pollice e l'indice appena sotto una estremità. Delicatamente premere l'estremità che non è bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per i migliori risultati, girare dolcemente e premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della piastra prima della centrifugazione.

Centrifugazione - I capillari vanno posti nella centrifuga ponendo l'estremità sigillata all'esterno; (si consiglia di osservare le istruzioni del produttore della centrifuga).

Letture del valore dell'ematocrito - Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea con le cellule scure del sangue. Questo facilita la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito.

Per microematocrito monouso

- Senza anello di calibrazione
- Secondo BS 4316-68 e DIN 12 846
- Con anello Color Code
- Lunghezza 75 mm \pm 1 mm, spessore circa mm 0,2, diametro interno mm 1,1...1,2, diametro esterno mm 1,5...1,6
- Per uso con centrifughe per ematocrito
- Durata circa 3 anni a temperatura ambiente

Eparinizzati - Con sodio eparina all'interno di tutta la superficie, Color-Code rosso, per sangue capillare.

Non eparinizzati - Color code blu, per uso con a venoso ed eparinizzato. Non graduati.

Confezione da 1000 pezzi formata da 10 astucci da 100.

Modello	Capacità μ l	Color Code	Codice
Eparinizzati	35	rosso	FH60690
Non eparinizzati	35	blu	FH60691

Cera sigilla capillari

Descrizione	Codice	
Cera sigilla capillari	FH60695	Cera vinilica non essiccante, contenuta in un vassoio, per sigillare rapidamente e senza rischi centinaia di capillari per ematocrito. La cera per capillari può essere tenuta fino a 3 anni ad una temperatura compresa tra i 15°C ed i 30°C. Confezione da 10 pezzi.



Monouso secondo Delbrück

BLAUBRAND, conformità certificata

Secondo DIN ISO 7550. Il volume indicato è dato dal riempimento da un'estremità all'altra. Calibrate per contenere (In). Eparinizzati con sodio, ideali per il campionamento di sangue capillare. La pipetta è lunga soltanto mm 30,5 e riempita può essere lasciata all'interno delle microprovette dove può rimanere durante la centrifugazione. Accuratezza \pm 0,5%; riproducibilità 1%.

Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE. Confezione da 1000 formata da 10 astucci da 100.

Capacità μ l	Imballo	Codice
20	10 x 100	SE08650
50	10 x 100	SE08654



Accessori	Codice
Sostegno per pipetta e per capillari IntraEND e Delbrück.	SE08605



Per punto di fusione

Capillari in vetro con un'estremità chiusa. Spessore uniforme, diametro mm 1,3...1,5. Lunghezza mm 75.

Descrizione	Codice
Capillari in vetro per punto di fusione	QS01830